


# 室蘭での針とシリンジが 変わりました

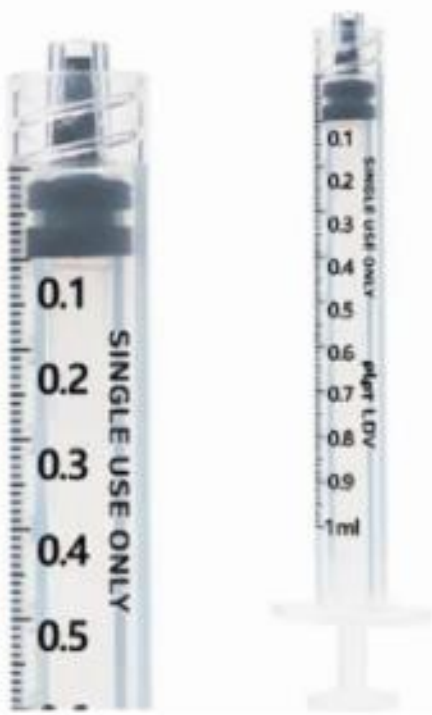

接種時に使用するシリンジが、ロック式になりました。針を付けるときネジを締めるように回して付けます。針もセーフティカバー付きになりました。セーフティカバーは横に動かして充填しますが、室蘭では接種時に邪魔になるとのことで、ねじ切ってくださいとされています。

ねじ切る時は、接続部が不潔にならないように、シリンジに付けてから、ねじ切ってください。

また、針は今までは、包装を開けると接続部が出てきていましたが、今回は逆に入っています。一度針を包装から取り出して、シリンジに付けることとなります。

実物をさわると納得すると思います。



サンプルで、不潔になった針をもらってきたもので、シリンジに付けていない状態ですが、ねじ切るとこんな感じになります。

